

# **SPIROMETRIE**

<b>Rédigée par :</b> Dr E. Thomas, Dr M	I. Coulange	Type du document :	Liste de diffusion :								
Vérifiée et validée par :		PROTOCOLE	PM et PNM du service								
Approuvée par : Dr M. Coulange	(Chef de service)										
		Domaine :									
		EXAMEN PARACLINIQUE									
Date création : 19/08/2014	Date de mise à jour :	N° de version :	Archivé :								
	22/04/2021	1	E:\A PRO\000. CERTIFICATION V2018\SOINS\20. EXAMEN PARACLINIQUE								

Indice	Date	Description de la modification

### I – OBJET DE LA PROCEDURE

La présente procédure a pour objet de préciser :

- Les modalités de réalisation d'une spirométrie
- L'utilisation du logiciel winspiropro

#### **II – DOMAINE D'APPLICATION**

La présente procédure s'adresse :

- au personnel de soins et aux techniciens du service
- aux médecins hyperbares du service
- au personnel du secrétariat du service

### **III- CONTENU DE LA PROCEDURE**

#### III. I. Mise en route du logiciel

Brancher l'ordinateur, ouvrir l'écran et entrer sa session (le boîtier relié à l'ordinateur, turbine vissée + tube carton à usage unique).

#### Cliquer sur WINSPIROPRO « icône poumon »

Cliquer sur : Patient

Insérer le nouveau patient Nouveau Assigner le progressif Nom + prénom + date de naissance + sexe Enregistrer Taille + poids Ok Non fumeur ou fumeur ou ex-fumeur

Motif de la visite : (cocher l'un ou l'autre indifféremment)

Enregistrer

Cliquer sur **CVF** (icône barre du haut)

#### III.2. Information du patient

Position debout, mettre le pince-nez, remplir ses poumons par la bouche, mettre le tube dans la bouche. Souffler fort et longtemps pour vider entièrement ses poumons, inspirer normalement et enlever le tube.

### III.3. Réaliser l'examen

Cliquez sur **démarrer**, quand démarrer devient gris et que « **souffler** » s'affiche en bas, le patient peut exécuter l'examen. (si au lieu de « souffler », il est noté : « erreur de communication pendant la lecture provenant du port USB » : il faut débrancher la prise USB et la rebrancher et recliquer sur démarrer.

Si l'examen est mal fait par le patient, cliquer sur « stop/sup » réexpliquer et recommencer la procédure entière. Quand l'examen est satisfaisant, cliquer sur « accepter » : la page des valeurs s'affiche ; cliquer sur « imprimer » et une deuxième fois sur « imprimer ».

Sortir de l'écran pour un autre patient.

TUTORIEL : Comment réaliser une spirométrie

### III.4. Quelques exemples de courbes

### <u>Normale</u>



#### Date du test PRE 29/08/2019 16:09:08

Paramètres		LLN	Pred	Best	%Théor.	Z-score	PRE #1	PRE #2	PRE #3	POST	%Théor.	%Chg
FVC	L	4,78	5,79	6,88*	119	1,79	6,88			*		
FEV1	L	3,97	4.81	5,53*	115	1.41	5,53			*		
FEV1/FVC	%	70,6	82.4	80,4*	98	-0.27	80,4			*		
PEF	L/s	8,54	10.53	12,49*	119	1.62	12,49			*		
ELA	Age		27	27	100		27					
FEF2575	L/s	3,48	5,19	5,13	99	-0,05	5,13					
FET	s		6,00	5,05	84		5,05					
FIVC	L	4,78	5,79									
FEV1/VC	%	70,6	82.4									

\*Meilleures valeurs de tous les tests - BTPS 1,078 28 °C (82,4 °F) - Théoriques ERS (ECCS) / Knudson

# Apnéiste



#### Date du test PRE 03/05/2016 13:04:52

Paramètres		LLN	Pred	Best	%Théor.	Z-score	PRE #1	PRE #2	PRE #3	POST	%Théor.	%Chg
FVC	L		5,22	10,88*	208		10,88	10,83	9,36	*		
FEV1	L		4.27	7,00*	164		7,00	6,62	5.82	*		
FEV1/FVC	%		81.5	64,3*	79		64,3	61,1	62.2	*		
PEF	L/s		10.34	9,48*	92		9,45	9,48	8.00	*		
ELA	Age		44	44	100		44	44	44			
FEF2575	L/s		4,31	5,04	117		5,04	4,73	4,90			
FET	s		6,00	6,12	102		6,12	6,94	5,41			
FIVC	L		5,22	5,83	112		5,83	6,05	5,75			
FEV1/VC	%		81.5									

\*Meilleures valeurs de tous les tests - BTPS 1,087 26 °C (78,8 °F) - Théoriques Pneumobill / Knudson

## **Obstructif**



#### Date du test PRE 10/04/2015 10:39:23

Paramètres		LLN	Pred	Best	%Théor.	Z-score	PRE #1	PRE #2	PRE #3	POST	%Théor.	%Chg
FVC	L		4,86	5,56*	114		5,56	5,26		*		
FEV1	L		3,86	2,52*	65		2,45	2,52		*		
FEV1/FVC	%		79.0	45,3*	57		44,1	47,9		*		
PEF	L/s		9.72	4,86*	50		4,69	4,86		*		
ELA	Age		57	107	188		107	105				
FEF2575	L/s		3.56	0,95	27		0,95	0,97				
FET	s		6.00	7,87	131		7,87	9,87				
FIVC	L		4,86	4,62	95		4,62	4,80				
FEV1/VC	%		79,0									

\*Meilleures valeurs de tous les tests - BTPS 1,082 27 °C (80,6 °F) - Théoriques Pneumobill / Knudson

# **Restrictif**



#### Date du test PRE 22/04/2016 11:41:53

Paramètres		LLN	Pred	Best	%Théor.	Z-score	PRE #1	PRE #2	PRE #3	POST	%Théor. %C	hg
FVC	L		2,80	1,75*	63		1,75			*		
FEV1	L		2,27	1,41*	62		1,41			*		
FEV1/FVC	%		80.2	80,6*	100		80,6			*		
PEF	L/s		5.86	3,79*	65		3,79			*		
ELA	Age		55	96	175		96					
FEF2575	L/s		2.28	1,46	64		1,46					
FET	s		6.00	4,25	71		4,25					
FIVC	L		2,80	1,41	50		1,41					
FEV1/VC	%		80,2									

\*Meilleures valeurs de tous les tests - BTPS 1,087 26 °C (78,8 °F) - Théoriques Pneumobill / Knudson